

Prodotto reflexx 77: - art. R77100F/S- art. R77100F/M- art.- art. R77100F/L- art. R77100F/XL

- art. R77100/XS - art. R77100/ S – art. R77100/ M – art. R77100/ L– art. R77100/ XL

- art. R77/XS - art. R77/ S – art. R77/ M – art. R77/ L– art. R77/ XL

Emessa da G.Isetti – Amm.re Unico

Pag.: 1/4

GUANTI MONOUSO DA ESAME IN NITRILE SENZA POLVERE MARCHIO REFLEXX 77

1. NOME E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE

REFLEXX S.p.A.
Via Passeri, 2
46019 VIADANA (MN)
Tel. 0375 758891 Fax. 0375 464504

2. DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO E VARIANTI PREVISTE

- Guanto monouso in nitrile sintetico a cinque dita con bordino arrotolato, ambidestro, di colorazione azzurra, superficie microruvida e dita testurizzate
- Guanto non sterile, privo di polvere all' interno e internamente clorinato per facilitare la calzata e ridurre il rischio di allergie.
- Guanto polivalente a protezione della mano e/o del prodotto manipolato; può essere utilizzato per usi generici.
- Guanto utilizzabile come Dispositivo Medico da esame, anche invasiva, destinato ad un uso temporaneo*
- Guanto utilizzabile come Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) anche contro agenti chimici, microrganismi e virus
- Unità di Vendita in confezioni da 100 pz o 200 guanti/pz.
- Imballaggi esterni contenenti n° 10 confezioni



Imballo		
Cod./Taglie	Confezione	Cartone
R77100F/S	8032891633878	8032891638873
R77100F/M	8032891633892	8032891638897
R77100F/L	8032891633922	8032891638927
R77100F/XL	8032891633953	8032891638958
R77100/XS	8032891633465	8032891638460
R77100/S	8032891633472	8032891638477
R77100/M	8032891633489	8032891638484
R77100/L	8032891633496	8032891638491
R77100/XL	8032891633502	8032891638507
R77/XS	8032891633809	8032891638804
R77/S	8032891633823	8032891638828
R77/M	8032891633847	8032891638842
R77/L	8032891633861	8032891638866
R77/XL	8032891633885	8032891638880

Prodotto reflexx 77: - art. R77100F/S- art. R77100F/M- art.- art. R77100F/L- art. R77100F/XL

- art. R77100/XS - art. R77100/ S – art. R77100/ M – art. R77100/ L– art. R77100/ XL

- art. R77/XS - art. R77/ S – art. R77/ M – art. R77/ L– art. R77/ XL

Emessa da G.Isetti – Amm.re Unico

Pag.: 2/4

3. QUALITÀ E CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE VIGENTI



-Come DPI rientra nella III Categoria di rischio ai sensi del Reg 2016/425 (ANCI_CIMAC, corso Brodolini, 19 27029 Vigevano (PV): ente certificatore autorizzato n. 0465). Il prodotto, è certificato in accordo con le normative EN 420:2003 + A1 2009, EN 374-1:2016 TIPO B, EN 374-2:2014, EN 374-4:2013 e EN 374-5:2016 VIRUS (ISO 16604:2004)

-*Dispositivo Medico CLASSE I - Dir. 93/42/CEE – Dir 2007/47/CEE – EN 455 1,2,3, & 4 CND T01020204 – GUANTI NON CHIRURGICI IN NITRILE - Progressivo di Sistema: mis.R77/XS/1528651;R77/S/1528652;R77/M/1528653;R77/L/1528654;R77/XL/1528655 mis.R100/XS/1528659;R100/S/1528660;R100/M/1528658;R100/L/1528656;R100/XL/1528657.

-*Il prodotto è conforme alle normative ASTM-F-1671 (test di penetrazione virale) e ISO 10993-10 (irritazione e sensibilizzazione cutanea)



Reg CE 1935/2004 – Reg UE 10/2011 - DM 21/03/1973

Per tale utilizzo leggere attentamente la dichiarazione di idoneità al contatto alimentare (DICA).

*Queste conformità non sono dichiarate sui prodotti venduti come linea food.

4. DIMENSIONI E PRESTAZIONI

DIMENSIONI				
Cod./Taglia			Lungh. min. (mm)	Largh. mm (±5)
/	R77100/ XS (6)	R77/ XS (6)	240	75
R77100F/S (7)	R77100/ S (7)	R77/ S (7)	240	85
R77100F/M (8)	R77100/ M (8)	R77/ M (8)	240	95
R77100F/L (9)	R77100/ L (9)	R77/ L (9)	240	106
R77100F/XL (10)	R77100/ XL (10)	R77/ XL (10)	240	116

EN 420:2003 + A1 2009	Costruzione	conforme
	Misure	conforme
	Indossabilità	conforme
	Destrezza	diametro minimo piolo raccolto 5 mm

Spessore mm	Palmo (+/- 0.02)	0.06
-------------	------------------	------

EN 455-2:2009/A1	Carico di rottura	≥6 N
------------------	-------------------	------

REFLEXX S.p.A. Unipersonale	NOTA INFORMATIVA	rev 04 del 29 ottobre 2018
Prodotto reflexx 77: - art. R77100F/S- art. R77100F/M- art.- art. R77100F/L- art. R77100F/XL		
- art. R77100/XS - art. R77100/ S – art. R77100/ M – art. R77100/ L– art. R77100/ XL		
- art. R77/XS - art. R77/ S – art. R77/ M – art. R77/ L– art. R77/ XL		
<i>Emessa da G.Isetti – Amm.re Unico</i>		Pag.: 3/4

Composto chimico:	COD	EN 374-1:2016 TIPO B		EN 374-4:2013
		Livello prestazionale	Tempo di passaggio	% degradazione
Acido solforico 96%	L	2	>30'	94%
Sodio idrossido 40%	K	3	>60'	47%
Dietilammina	G	2	>30'	73%
p-Fenilendiammina 5%		3	>60'	61%

EN ISO 374-5:2016	Protezione da microrganismi (batteri e funghi)	Protezione da virus ISO 16604:2004
	superata	superata

ISO 2859		
AQL 1.5 (livello G1) per assenza di fori	AQL 2.5 (livello G1) per maggiori difettosità	AQL 4 (livello G1) per minori difettosità

EN 374-2:2014	Prova di perdita d'acqua	superata
	Prova di perdita d'aria	superata

5. AVVERTENZE PER L'USO E LO STOCCAGGIO

1. Si raccomanda di leggere attentamente la presente nota informativa prima dell'utilizzo del guanto
2. Si raccomanda di conservare la presente nota informativa per tutta la durata della vita utile del guanto
3. Il prodotto non contiene lattice naturale
4. In rari casi si possono verificare reazioni cutanee transitorie e reazioni di ipersensibilità. In casi di reazione sospendere l'utilizzo. I guanti in nitrile Reflexx 77 sono progettati allo scopo di eliminare le reazioni allergiche associate alle proteine del lattice. L'assenza di polveri consente l'utilizzo del guanto anche alle persone che soffrono di irritazioni causate da allergie all'amido di mais o da una pelle particolarmente sensibile
5. Evitare il contatto con agenti aggressivi quali grassi, olii, acidi, idrocarburi, solventi chetonici ed altri aggressivi chimici
6. Il guanto è idoneo al contatto con prodotti chimici puri per un periodo inferiore al tempo di permeazione indicato nella tabella di resistenza chimica. I risultati sono ottenuti in condizioni di laboratorio e possono non riflettere la durata effettiva sul posto di lavoro.
7. Prima di utilizzare il prodotto provarlo nella reale condizione di utilizzo
8. Il guanto è un dispositivo soggetto ad usura per cui si raccomanda la sostituzione frequente e in tutti i casi in cui visivamente si scorgono imperfezioni. Indossare i guanti sempre con le mani asciutte e pulite e dopo l'uso lavarsi accuratamente le mani
9. Conservare la confezione per ulteriori informazioni e garantire la rintracciabilità
10. Conservare il prodotto nella confezione originale in luogo asciutto
11. Evitare l'esposizione alla luce del sole ed a fonti di calore



REFLEXX S.p.A. Unipersonale

NOTA INFORMATIVA

rev 04 del 29 ottobre 2018

Prodotto reflexx 77: - art. R77100F/S- art. R77100F/M- art.- art. R77100F/L- art. R77100F/XL

- art. R77100/XS - art. R77100/ S – art. R77100/ M – art. R77100/ L– art. R77100/ XL

- art. R77/XS - art. R77/ S – art. R77/ M – art. R77/ L– art. R77/ XL

Emessa da G.Isetti – Amm.re Unico

Pag.: 4/4

12. La scadenza è di 3 anni a partire dalla data di produzione, indicata sulla confezione di vendita, ed è valida per prodotto debitamente conservato
13. Smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali in vigore

REFLEXX S.p.A.
Via Passeri, 2 - 46019 VIADANA (MN)
P.I. e C.F. 02085450209
Tel. 0375/33164 - Fax: 0375/464504
e-mail: info@reflexx.com

