

|  |                         |                                 |
|--|-------------------------|---------------------------------|
| <b>REFLEXX S.p.A. Unipersonale</b>               | <b>NOTA INFORMATIVA</b> | <b>rev 08 del 2 luglio 2018</b> |
| Prodotto FEATHER NITREXX                         |                         |                                 |
| art. FNX/ S – FNX /M – art. FNX /L - art FNX /XL |                         |                                 |
| <i>Emessa da G.Isetti – Amm.re Unico</i>         |                         | Pag.: 1/2                       |

## GUANTI MONOUSO DA ESAME IN NITRILE SENZA POLVERE

### MARCHIO FEATHER NITREXX

#### 1. NOME E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE

REFLEXX S.p.A.  
Via Passeri, 2  
46019 VIADANA (MN)  
Tel. 0375 758891 Fax. 0375 464504

#### 2. DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO E VARIANTI PREVISTE

- Guanto monouso in nitrile sintetico a cinque dita con bordino arrotolato, ambidestro, di colorazione blu.
- Guanto non sterile e privo di polvere all'interno.
- Guanto polivalente a protezione della mano e/o del prodotto manipolato; può essere utilizzato per usi generici.
- Guanto utilizzabile come Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) contro rischi minori
- Unità di Vendita in confezioni da 100 guanti/pz. in scatole di cartoncino teso riciclabile
- Imballaggi esterni contenenti n° 10 confezioni realizzati con cartone ondulato riciclabile

#### Imballo

| 100    |               | 10     |                |
|--------|---------------|--------|----------------|
| Taglia | Articolo      | Taglia | Cartone        |
| FNX/S  | 8008990232311 | S      | 8008990968166  |
| FNX/M  | 8008990232328 | M      | 8008990968159  |
| FNX/L  | 8008990232335 | L      | 8008990968142  |
| FNX/XL | 8008990232397 | XL     | 80089909680641 |

#### 3. QUALITÀ E CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE VIGENTI:

- Come DPI rientra nella I Categoria di rischio per rischi minori ai sensi del Reg. 2016/425.

#### 4. DIMENSIONI E PRESTAZIONI

| Dimensioni<br>(in mm.) | Taglia             |                   | Lunghezza<br>(min.) | Larghezza<br>+/- 5 |
|------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|                        | descrizione taglia | taglia a norma CE |                     |                    |
|                        | S                  | 7                 |                     |                    |

|  |                         |                                 |
|--|-------------------------|---------------------------------|
| <b>REFLEXX S.p.A. Unipersonale</b>               | <b>NOTA INFORMATIVA</b> | <b>rev 08 del 2 luglio 2018</b> |
| Prodotto FEATHER NITREXX                         |                         |                                 |
| art. FNX/ S – FNX /M – art. FNX /L - art FNX /XL |                         |                                 |
| <i>Emessa da G.Isetti – Amm.re Unico</i>         |                         | Pag.: 2/2                       |

|  |    |    |     |     |
|--|----|----|-----|-----|
|  | M  | 8  | 240 | 95  |
|  | L  | 9  | 240 | 106 |
|  | XL | 10 | 240 | 115 |

|               |                |      |
|---------------|----------------|------|
| Spessore (mm) | Palmo (± 0.02) | 0.05 |
|---------------|----------------|------|

|        |               |                            |
|--------|---------------|----------------------------|
| EN 420 | Misure        | Conforme                   |
|        | Indossabilità | Conforme                   |
|        | Destrezza     | Massima destrezza Classe 5 |

## 5. AVVERTENZE PER L'USO E LO STOCCAGGIO

1. Si raccomanda di leggere attentamente la presente nota informativa prima dell'utilizzo del guanto
2. Si raccomanda di conservare la presente nota informativa per tutta la durata della vita utile del guanto
3. Il prodotto non contiene lattice naturale
4. In rari casi si possono verificare reazioni cutanee transitorie e reazioni di ipersensibilità. In casi di reazione sospendere l'utilizzo e consultare un medico. I guanti in nitrile Feather nitrexx sono progettati allo scopo di eliminare le reazioni allergiche associate alle proteine del lattice. L'assenza di polveri consente l'utilizzo del guanto anche alle persone che soffrono di irritazioni causate da allergie all'amido di mais o da una pelle particolarmente sensibile
5. Evitare il contatto con agenti aggressivi quali grassi, olii, acidi, idrocarburi, solventi chetonici ed altri aggressivi chimici
6. Prima di utilizzare il prodotto provarlo nella reale condizione di utilizzo
7. Il guanto è un dispositivo soggetto ad usura per cui si raccomanda la sostituzione frequente e in tutti i casi in cui visivamente si scorgono imperfezioni. Indossare i guanti sempre con le mani asciutte e pulite e dopo l'uso lavarsi accuratamente le mani
8. Conservare la confezione per ulteriori informazioni e garantire la rintracciabilità
9. Conservare il prodotto nell'imballaggio originale in luogo asciutto
10. Evitare l'esposizione alla luce del sole ed a fonti di calore
11. La Scadenza è indicata sulla confezione di vendita ed è valida per prodotto debitamente conservato
12. Smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali in vigore

**REFLEXX S.p.A.**  
 Via Passeri, 2 - 46019 VIADANA (MN)  
 P.I. e C.F. 02085450209  
 Tel.: 0375831164 - Fax: 0375/464504  
 e-mail: info@reflexx.com